

TECHNICAL DATA/ FICHA TÉCNICA

MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION (NOMBRE DE PRODUCTO)	CARACTERISTICAS
IH-107		Paquete caliente y frio / Hot and cold pack	Reutilizable y económico Versátil, permite uso en frío y calor

DESCRIPCION DE MATERIA PRIMA

Material interno				Material
Nombre químico	No CAS	Peso-%	Clasificación según la Directiva 67/548 / CEE o 1999/45 / CE	Funda protectora: PE de nylon
Agua	7732-18-5	98.4985-99. 8985	No clasificado	
Carbómero	76050-42-5	0.1-1.5	No clasificado	
Mezcla, 3 (2H) - isotiazolona, con 5-cloro-2-metil- con 2-metil-3 (2H) -isotiazolona	55965-84-9	0.0015	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53	

ESPECIFICACIONES

- **Tamaño:** 24.8*12.1 cm
- **Peso:** 230 g

MODO DE USO

USO EN FRÍO:

Para la terapia de frío, almacene el producto en el congelador durante un mínimo de una hora antes de su uso. Para casos de emergencia, mantenga siempre un paquete en el congelador para su uso inmediato.

USO EN CALIENTE:

Para la terapia de calor, coloque el producto en el microondas y caliéntelo durante 20 segundos. Aumente el tiempo de calentamiento en intervalos de 10 segundos para alcanzar la temperatura deseada.

ALMACENAMIENTO:

Mantener alejado del calor directo y extremo. Almacene en un lugar seco.

PRECAUCIÓN:

Las personas con problemas circulatorios no deben usar una compresa fría o caliente excepto bajo la supervisión de un profesional médico.

ADVERTENCIA:

Sólo para uso externo. Nocivo si se ingiere. Si se ingiere la solución, beba varios vasos de agua y póngase en contacto con su médico inmediatamente.

No perforo la bolsa exterior.

Si el paquete se rompe y el líquido entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague con agua inmediatamente y consulte a su médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

EMPAQUE

Método de embalaje: PCS / caja	Envase primario: BOLSA DE PE (NYLON)	Envase secundario: 1PC/ CAJA DE CARTON	Envase terciario: 20 PC/ CAJA DE CARTON
--	---	---	--