

FICHA TÉCNICA

PANTUFLAS COMPRESA FRÍO/CALOR PAR REF:BA4406



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material Exterior: Cubierta de tela técnica suave al tacto, hipoalergénica y de alta durabilidad.
- Material Interior: Relleno de gel terapéutico avanzado de alta densidad, diseñado para mantener la temperatura de forma prolongada sin endurecerse.
- Dimensiones: Diseño ergonómico de 27 cm de largo por 13 cm de ancho, ideal para un ajuste cómodo y envolvente.
- Color: Negro profesional con acabado mate.

TERAPIA DE FRÍO



- 1) Coloque en el congelador por más de 90 minutos



- 2) Retire las pantuflas del congelador y pruebe la temperatura



- 3) Siéntese y use las pantuflas en intervalos de 20 minutos

Use la terapia de frío para esguinces, distensiones, inflamación y pies fríos.

TERAPIA DE CALOR



- 1) Coloque las pantuflas en el microondas por 30 segundos



- 2) Déles la vuelta y repita



- 3) Retire del microondas, pruebe la temperatura y distribuya el gel de manera uniforme



- 4) Siéntese y use las pantuflas en intervalos de 20 minutos

FUNCIONALIDAD (FRÍO/CALOR)

- Terapia de Calor: Calentar en microondas la compresa (en intervalos cortos) para mejorar la circulación sanguínea, aliviar la rigidez articular o simplemente calentar los pies fríos.
- Terapia de Frío: Se enfrían en el congelador para reducir la inflamación, aliviar el dolor por esguinces, fascitis plantar o disminuir la hinchazón después de un día largo.

ALIVIO CALMANTE PARA PIES HINCHADOS



AYUDA CON



BENEFICIOS PRINCIPALES

- Alivio del dolor: Ideales para personas con artritis, gota, o dolores crónicos en los pies.
- Relajación: Ayudan a relajar los músculos tensos después de hacer ejercicio o estar mucho tiempo de pie.
- Permiten una movilidad limitada (aunque no se recomienda caminar distancias largas con ellas puestas para evitar dañar las bolsas de gel).

